

Návod k použití fytofontana HEMORRELAX rektální krém



Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití.
Ušchevejte si návod k použití pro případ dalšího použití.

Hemoroidální onemocnění patří k nejrozšířenějším chorobám a podle statistik během života postihuje až 75 % lidí ve věku od 25 let. Hemoroidální onemocnění (lidově „zlatá žíla“) představuje pro člověka psychickou zátěž, často spojenou s bolestí, omezením a celkovým dopadem na kvalitu života, zejména v pokročilejších stadiích.

Hemoroidy (žíly v konečniku) jsou přirozenou součástí každého lidského těla. Fungují jako pružný, vodotěsný uzávěr a mají nezastupitelnou úlohu při udržení a vyprazdňování střevního obsahu. Problém nastává při vzniku hemoroidálního onemocnění, kdy se hemoroidy zvětší, zanítí a může v nich dojít k vytvoření krevní sraženiny. Z anatomického hlediska je sliznice konečniku vystlána hustou cévní sítí, která zajišťuje výživu okolní tkáň. Při nadměrném tlaku se cévy nadměrně rozšíří, krev se v nich hromadí a mohou se vytvářet uzly (obdobu křečových žil).

Při léčbě hemoroidů se v první řadě uplatňuje úprava životního stylu – dostatek pohybu, posilování pánevního dna, úprava stravy, pravidelné a správné vyprazdňování a dodržování hygieny.

Konzervativní léčba (krémy, čípky, sedací koupele) je zaměřena na zmírnění lehčích projevů, jako je podráždění, citlivost, svědění, a také bolestí v oblasti konečniku při hemoroidech a dalších onemocněních konečniku.

Složení: panthenol (0,15 g), extrakt z kůry dubu letního (0,60 g), extrakt ze semen jírovce koňského (0,60 g), extrakt z květů měsíčku lékařského (0,60 g), extrakt z květů heřmánku pravého (0,60 g), sodná sůl kyseliny hyaluronové (0,03 g), aloe vera (1,2 g), oxid zinečnatý (0,003 g), laureth-9, dimetikon, acetyl hexapeptid-1, pentapeptid-18, voda, tekutý parafín, polyakrylamid (a) izoparafín C13–14 (a) laureth-7, glyceryl stearát, isopropylmyristát, lanolínový olej, cetearylalkohol, polysorbát 20, laureth-30, fenoxylethanol, ethylhexylglycerin, glycerin

Účel určení

Zdravotnický prostředek fytofontana HEMORRELAX rektální krém napomáhá ke zmírnění nepříjemných doprovodných příznaků vyskytujících se u vnějších hemoroidů v souvislosti s onemocněními hemoroidálního původu a dalšími onemocněními konečniku, jako jsou anální fisury a ragády.

Fytofontana HEMORRELAX rektální krém je určen k vytvoření ochranné vrstvy při hemoroidálním onemocnění konečniku aplikací krému lokálně na pokožku a sliznici v oblasti konečniku.

Indikace

- lokální použití v oblasti rekta a análního otvoru pro podporu ochrany a regenerace sliznice konečniku,
- perianální podráždění způsobené častou stolicí, hygienickými zásahy nebo zvýšeným třením,
- hemoroidy (doprovodná léčba u vnitřních i vnějších hemoroidů),
- anální trhliny (anální fisury – pro podporu hojení a regenerace sliznice konečniku).

Hlavní mechanismus účinku

Zdravotnický prostředek fytofontana HEMORRELAX rektální krém působí fyzikálně a mechanicky tím, že vytváří ochrannou vrstvu na povrchu pokožky a sliznice, čím zabraňuje dalšímu podráždění, snižuje tření a udržuje vlhkost. Přípravek zároveň hydratuje tkáň (např. kyselina hyaluronová, panthenol,

glycerin), podporuje epitelizaci a granulaci (např. měsíček, aloe, heřmánek) a má lokální adstringentní a mírně antiseptický účinek (např. dubová kůra, oxid zinečnatý). Díky peptidům, které působí podobně jako botulotoxin, pomáhá uvolnit křečovitě stažené svalstvo análního svěrače, což napomáhá bezbolestnému vyprazdňování.

Účinnost je tedy zajištěna bez systémového účinku a bez metabolizace účinných látek. Přináší okamžitou úlevu od nepříjemných příznaků, jako je pálení, svědění a bolest v oblasti konečníku, při opruzeninách a popraskané sliznici a okolí konečníku.

Přípravek se nezaměřuje pouze na tlumení akutních příznaků, ale sliznici zklidňuje a působí preventivně. Nejedná se o metabolické, farmakologické ani imunologické účinky při hemoroidálním onemocnění.

Hlavním přínosem pro uživatele/pacienta je podpůrná lokální terapie ve formě rektálního krému, která přináší úlevu od nepříjemných příznaků, jako je pálení, svědění, bolest, opruzeniny a popraskaná sliznice v oblasti konečníku. Všechny složky zdravotnického prostředku jsou zaměřeny na vytvoření ochranné vrstvy při hemoroidálním onemocnění konečníku aplikací krému lokálně na pokožku a sliznici konečníku, čímž dochází ke zmírnění podráždění, zánětu a podpoře hojení v oblasti konečníku. Cílem je zmírnit příznaky hemoroidálního onemocnění, podpořit hojení tkáně a tím zlepšit celkovou kvalitu života dospělé populace.

Určení uživatelé / pacienti

Zdravotnický prostředek je určen k použití u dospělých osob od 18 let, které trpí nepříjemnými doprovodnými příznaky vyskytujícími se při hemoroidálním onemocnění konečníku.

Dávkování a způsob použití

Před použitím fytofontana HEMORRELAX rektálního krému doporučujeme dodržovat hygienu, důkladně si umýt ruce i ošetřovanou oblast.

Naneste přiměřené množství krému na špičku prstu a aplikujte na ošetřovanou oblast konečníku – lokálně na pokožku a sliznici v oblasti konečníku 2–3× denně.

Rektální krém se doporučuje aplikovat po defekaci. Po použití se doporučuje důkladně si umýt ruce.

Kontraindikace

- alergická reakce nebo přecitlivělost jako reakce lidského organismu na kteroukoliv složku,
- akutní zánět, infekce nebo absces v oblasti konečníku,
- nádorová onemocnění rekta,
- rektální nebo anální poranění v akutní fázi.

Upozornění, varování:

⚠ Používání prostředku se nedoporučuje u osob trpících chronickou zácpou (které musí stolicí vyprazdňovat násilím nebo případně manuálně stimulovat), stejně jako u osob, které mají problémy s udržení stolice.

⚠ Nepoužívejte na krvácivé hemoroidy.

⚠ Nepoužívat během těhotenství.

⚠ V případě podráždění nebo zhoršení stavu okamžitě přestaňte přípravek používat a obraťte se na svého lékaře.

⚠ Nepoužívejte přípravek, pokud je obal poškozený.

⚠ Nepoužívejte po datu expirace uvedeném na obalu.

⚠ Uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Preventivní opatření:

⚠ Současně nepoužívejte jiné přípravky na ošetřovanou oblast.

Obsah balení: plastová tuba s uzávěrem o obsahu 30 g

Skladování



Údaje jsou uvedeny na obalu

Životnost zdravotnického prostředku

Délku životnosti zdravotnického prostředku určuje datum expirace uvedené na obalu výrobku – 36 měsíců od data výroby.

Příslušenství nebo kompatibilní ZP

ZP Fytofontana HEMORRELAX rektální krém nemá příslušenství ani žádné kompatibilní zdravotnické prostředky.

Likvidace: Nepoužitý přípravek vraťte do lékárny. Čistý obalový materiál zlikvidujte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.



Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludince 404, Slovenská republika podle licence Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Švýcarsko











www.fytofontana.com




Další informace

V případě závažné nehody způsobené prostředkem by měl uživatel tuto událost nahlásit výrobci a příslušnému orgánu v členském státě, ve kterém má uživatel bydliště.

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

	Viz návod k použití		Výrobce
	Použitelné do		Číslo šarže
	Teplotní limit		Chraňte před slunečním zářením
	Značka shody		Zdravotnický prostředek
	Referenční (katalogové číslo)		Unikátní identifikátor prostředku
	Varování		

Datum vydání: 23.01.2026

 14007C-P-1