

Használati utasítás

fytofontana HEMORRELAX végbélkrém



Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
Őrizze meg a használati utasítást későbbi felhasználás esetére.

Az aranyérbetegség a leggyakoribb megbetegedések közé tartozik, a statisztikák szerint a 25 év feletti lakosság akár 75%-át is érintheti. Az aranyérbetegség (aranyér) jelentős pszichés terhet jelenthet, gyakran fájdalommal, korlátozottsággal és az életminőség romlásával jár, különösen az előrehaladottabb stádiumokban.

Az aranyerek (a végbél vénái) minden emberi test természetes részét képezik. Rugalmas, vízzáró zárómechanizmusként működnek, és fontos szerepet játszanak a széklet visszatartásában és ürítésében. Probléma akkor alakul ki, amikor aranyérbetegség jön létre: az aranyerek megnagyobbodnak, begyulladnak, és vérrög képződhet bennük. Anatómiai szempontból a végbél nyálkahártyája sűrű érhalózzal van ellátva, amely a környező szövetek táplálását biztosítja. Túlzott nyomás esetén az erek kitágulnak, a vér pang bennük, és csomók (visszerekhez hasonló elváltozások) alakulhatnak ki.

Az aranyér kezelésében elsődleges szerepe van az életmódváltásnak – megfelelő mozgás, a medencefenék izmainak erősítése, étrend módosítása, rendszeres és helyes székletürítés, valamint a megfelelő higiénia. A konzervatív kezelés (krémek, kúpok, ülőfürdők) célja az enyhébb tünetek – irritáció, érzékenység, viszketés, fájdalom – csökkentése aranyér és egyéb végbéltáji betegségek esetén.

Összetétel: panthenol (0,15 g), nyári tölgykéreg-kivonat (0,60 g), vadgesztenye-mag kivonat (0,60 g), orvosi körömvirág-kivonat (0,60 g), orvosi kamillavirág-kivonat (0,60 g), nátrium-hialuronát (0,03 g), aloe vera (1,2 g), cink-oxid (0,003 g), laureth-9, dimetikon, acetil-hexapeptid-1, pentapeptid-18, víz, folyékony paraffin, poliakrilamid (és) C13–14 izoparaffin (és) laureth-7, gliceril-sztearát, izopropil-mirisztát, lanolinolaj, cetearyl-alkohol, poliszorbát 20, laureth-30, fenoxietanol, etil-hexil-glicerin, glicerin

Rendeltetészerű használat

A fytofontana HEMORRELAX végbélkrém orvostechnikai eszköz, amely segít enyhíteni a külső aranyér esetén jelentkező kellemetlen kísérő tüneteket, valamint az aranyeres eredetű és egyéb végbéltbetegségekkel összefüggő panaszokat, például végbélrepedések esetén. A fytofontana HEMORRELAX végbélkrém a krém helyi alkalmazásával védőréteget képez a végbél területén, a bőrön és a nyálkahártyán.

Javallatok

- helyi alkalmazás a végbél és az anális nyílás területén a nyálkahártya védelmének és regenerációjának támogatására,
- perianális irritáció gyakori székletürítés, higiéniai beavatkozások vagy fokozott súrlódás miatt,
- aranyér (kiegészítő kezelés belső és külső aranyér esetén),
- anális repedések (anális fisszúrák – a nyálkahártya gyógyulásának és regenerációjának támogatására).

Fő hatásmechanizmus

A fytofontana HEMORRELAX végbélkrém orvostechnikai eszköz, amely fizikai és mechanikai hatásmechanizmussal fejti ki hatását. Védőréteget képez a bőr és a nyálkahártya felszínén, ezáltal

hozzájárul az irritáció megelőzéséhez, csökkenti a súrlódást és segít fenntartani a megfelelő nedvességtartalmat.

A készítmény hidratálja a szöveteket (pl. hialuronsav, panthenol, glicerin), támogatja a hámképződést (epitelizáció) és a szövetképződést (granuláció) (pl. körömvirág, aloe, kamilla), valamint enyhe összehúzó és antiszeptikus hatással rendelkezik (pl. tölgyfakéreg, cink-oxid).

A botulotoxin hatással rendelkező peptidek hozzájárulnak az anális záróizom görcsös összehúzódásának enyhítéséhez, ami elősegítheti a fájdalommentes székletürítést.

A hatás szisztémás felszívódás nélkül, az aktív összetevők metabolizációja nélkül valósul meg. A készítmény alkalmazása hozzájárulhat az olyan kellemetlen tünetek enyhítéséhez, mint az égő érzés, viszketés és fájdalom a végbélnyílás területén, valamint a bőr és a nyálkahártya kipirosodása, berepedezése esetén.

A készítmény nem kizárólag az akut tünetek enyhítésére szolgál, hanem nyugtató hatással rendelkezik, és megelőző alkalmazásra is alkalmas.

A készítmény nem farmakológiai, metabolikus vagy immunológiai hatásmechanizmuson alapul.

A készítmény fő előnye a felhasználó számára a végbélkrém helyi alkalmazásán alapuló támogató terápia, amely hozzájárulhat a kellemetlen tünetek, például égő érzés, viszketés és fájdalom enyhítéséhez a végbél területén, valamint a bőr és nyálkahártya kipirosodása vagy berepedezése esetén.

A készítmény valamennyi összetevője a védőréteg kialakítására irányul a végbél hemoroidális elváltozásainak kezelésében, helyi alkalmazás útján a végbél környékén, ezáltal csökkentve az irritációt és a gyulladást, valamint támogatva a szöveti regenerációt a végbél területén hemoroidális betegség esetén.

A készítmény célja a hemoroidális betegség tüneteinek enyhítése, a szöveti gyógyulás elősegítése és ezáltal a felnőtt populáció életminőségének javítása.

Célcsoport

Az orvostechikai eszköz 18 év feletti felnőttek számára készült, akik aranyérbetegséghez kapcsolódó kellemetlen tünetekkel küzdenek a végbél területén.

Adagolás és alkalmazás

A fitofontana HEMORRELAX végbélkrém alkalmazása előtt tartsa be az alapvető higiéniai szabályokat, alaposan mosson kezet, és tisztítsa meg a kezelendő területet.

Vigyen fel megfelelő mennyiségű krémet az ujjbegyére, és alkalmazza helyileg a végbélnyílás bőrén és nyálkahártyáján napi 2–3 alkalommal.

A végbélkrém használata székletürítés után ajánlott. Használat után mosson kezet

Ellenjavallatok

- túlérzékenység vagy allergia a végbélkrém bármely összetevőjével szemben,
- akut gyulladás, fertőzés vagy tályog a végbéltájdon,
- végbéldaganatos megbetegedések,
- akut fázisban lévő végbél- vagy anális sérülések.

Figyelmeztetések

⚠ A készítmény nem ajánlott krónikus székrekedésben szenvedőknek (akiknek erővel vagy manuálisan kell elősegíteniük a székletürítést), illetve azoknak, akiknek székletvisszatartási problémáik vannak.

- ⚠ Vérző aranyér esetén nem alkalmazható.
- ⚠ Terhesség alatt nem használható.
- ⚠ Irritáció vagy állapotromlás esetén azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz.
- ⚠ Ne használja, ha a csomagolás sérült.
- ⚠ Ne használja a csomagoláson feltüntetett lejárató idő után.
- ⚠ Gyermekektől elzárva tartandó.

Óvintézkedések:

- ⚠ A kezelt területen ne alkalmazzon egyidejűleg más készítményeket.

Csomag tartalma: 30 g krémet tartalmazó műanyag tubus

Tárolás:



A csomagoláson feltüntetett adatok szerint

Az orvostechnikai eszköz lejárati ideje

A termék eltarthatóságát a csomagoláson feltüntetett lejárati dátum határozza meg – a gyártástól számított 36 hónap.

Tartozékok vagy kompatibilis orvostechnikai eszközök

A fytofontana HEMORRELAX végbélkrém nem tartalmaz tartozékokat, és nem kompatibilis más orvostechnikai eszközökkel.

Hulladékkezelés

A fel nem használt készítményt vigye vissza a gyógyszertárba. A tiszta csomagolóanyagot a szelektív hulladékgyűjtőbe helyezze.



Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince 404, Szlovákia a Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Svájc licence alapján












www.fytofontana.com



További információk

A segédeszköz által okozott súlyos esemény bekövetkezése esetén a felhasználónak az eseményt jelenteni kell a gyártónak, valamint annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó lakóhellyel rendelkezik.

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

	Tekintse át a használati utasítást		Gyártó
	Lejárat dátum		Tételkód
	Hőmérsékleti korlát		Óvja a napfénytől
	Megfelelőségi jel		Orvostechnikai eszköz
	Katalógusszám		Egyedi eszközazonosító
	Figyelem		

Kiadás dátuma: 23.01.2026

 14007H-P-1